



Pastillas desecantes

Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado



Descripción

Las pastillas de secado se presentan en paquetes de tres unidades.

Cuando el indicador que existe sobre la pastilla de secado de su caja Dry and Store o Zephyr cambie de color, indica que es momento de cambiar la pastilla desecante. El momento depende de la humedad ambiental, el sudor de cada persona o los ciclos de uso del dispositivo de secado.

Extraiga la pastilla del dispositivo y abra una nueva del lote adquirido, pero solo una, puesto que el envase individual protector las mantienen aisladas de la humedad ambiental que acorta su vida hasta el momento de su uso.

Una vez extraída, simplemente colóquela en el interior de la caja tal y como estaba la anterior.

